

Urostomie-Pflege zu Hause

2-teilige Versorgung



Stoma
Skin
Soul



Dansac™ Produkte sind für die einfache Anwendung und zur Erhaltung der natürlich gesunden Haut konzipiert. Wenn Sie die Haut um Ihr Stoma herum gesund halten, können Sie sich bei all Ihren Aktivitäten wohler und sicherer fühlen.



Empfehlungen zur Hautgesundheit

Der Bereich um Ihr Stoma, auf dem die Hautschutzplatte haftet, wird als peristomaler Bereich bezeichnet. Es ist wichtig, diesen Hautbereich sauber zu halten und vor Stomaausscheidungen zu schützen. Das Stoma ist rot und feucht. Es hat keine Nervenenden und daher keine Empfindung. Es ist normal, wenn beim Reinigen des peristomalen Bereichs auf dem weichen Tuch etwas Blut zu sehen ist. Wenn Sie sich jedoch Sorgen über die Blutmenge machen, wenden Sie sich bitte an Ihre Pflegefachkraft.

Sie benötigen Folgendes:

- Entsorgungsbeutel
- Trockene Tücher zum Reinigen und Trocknen
- Warmes Wasser zum Reinigen
- Neuen Beutel und/oder neue Hautschutzplatte
- Schere zum Zuschneiden der Hautschutzplatte (falls erforderlich)
- Eventuelles weiteres Zubehör



Befeuchten Sie einige trockene Tücher mit warmem Wasser. Reinigen Sie das Stoma und die umgebende Haut gründlich.

Wechseln der 2-teiligen Versorgung



Nachdem Sie Ihr Stoma vermessen haben, übertragen Sie die Größe und Form Ihres Stomas mit der Stomavorlage oder -schablone auf die Schnitovorlage der Hautschutzplatte.



Passen Sie das Startloch mit einer kleinen Schere an und achten Sie darauf, dass Sie der Außenkante der Markierung folgen. Sorgen Sie dafür, dass das Loch gut zu Ihrem Stoma passt. Schneiden Sie die Hautschutzplatte entsprechend den Maßen der Stomaschablone zu.



Entfernen Sie vorsichtig den Beutel. Ziehen Sie die Haut am Bauch straff, indem Sie mit einer Hand darauf drücken, während Sie die Hautschutzplatte vorsichtig entfernen.



Reinigen Sie nach dem Entfernen die Haut um das Stoma mit warmem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.



Um die neue Hautschutzplatte anzubringen, entfernen Sie die Schutzfolie von der Hautschutzplatte unmittelbar vor dem Anbringen.



Positionieren Sie die Hautschutzplatte über dem Stoma. Drücken Sie die Hautschutzplatte mit den Fingern von der Mitte zum Rand hin an, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.



Rasten Sie den Beutel auf der Hautschutzplatte ein. Sorgen Sie durch Andrücken mit den Fingern dafür, dass der Beutel rundherum an der Hautschutzplatte befestigt ist.



Vergewissern Sie sich nochmals, dass der Beutel fest mit dem Hautschutzplattenring verbunden ist, indem Sie vorsichtig am Beutel ziehen.



Waschen Sie sich nach dem Versorgungswechsel gründlich die Hände.



Tipps für die tägliche Stomapflege

Messen Sie Ihr Stoma regelmäßig

Es kann sein, dass Ihr Stoma unmittelbar nach der Operation und in den darauffolgenden Wochen geschwollen ist. Diese Schwellung geht allmählich zurück. Daher ist es wichtig, dass Sie die Größe Ihres Stomas regelmäßig messen. Es empfiehlt sich, in den ersten 6 Wochen das Stoma regelmäßig zu messen.

Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Stomatherapeuten/in.

Hautgesundheit

Es ist wichtig, dass die Haut um das Stoma herum in gutem Zustand bleibt. Wenn es zu Beschwerden an der Haut um das Stoma herum kommt, wenn sie juckt, gerötet ist oder wund wird, kann dies auf Unterwanderung von Stomaausscheidungen hinweisen.

Wenden Sie sich bitte an Ihre/n Stomatherapeuten/in, wenn das Problem weiterhin besteht.



Weitere Informationen oder Muster zu unseren Beuteln finden Sie bei uns unter www.dansac.de


Jim, Krebsbekämpfer

WARNHINWEISE: Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts kann zu Risiken (wie etwa schlechter Haftung) für den Anwender führen. Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können das Produkt beeinträchtigen. Dies kann zu unangenehmen Gerüchen oder Undichtigkeiten führen. Stellen Sie anhand der Anweisungen sicher, dass Ihre Versorgung rund um Ihr Stoma richtig sitzt. Bei fehlerhafter Anbringung der Versorgung können Unterwanderungen und Hautschäden (z.B. Irritationen, rissige Haut, Ausschläge oder Rötungen) auftreten. Dies kann wiederum die Nutzungsdauer Ihrer Versorgung verkürzen.

ANMERKUNGEN: Bitte beachten Sie, dass die Person, die auf der Titelseite der Broschüre abgebildet ist, nicht mit der Person identisch ist, die für den Versorgungswechsel abgebildet wurde. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, wenden Sie das Produkt auf sauberer, trockener und unbeschädigter Haut an. Verzichten Sie auf Öle oder Lotionen. Diese Produkte können die Haftung Ihrer Versorgung beeinträchtigen. Überschüssiger Schleim aus einem Urostoma kann dazu führen, dass der Beutel langsamer als erwartet entleert wird.

Der optimale Sitz der Versorgung hängt von zahlreichen Faktoren, wie etwa der Beschaffenheit und Ausscheidung des Stomas, dem Zustand der Haut und den Körperkonturen ab. Sollten Sie Hilfe mit der Stomaversorgung oder bei Hautreizungen benötigen, kontaktieren Sie Ihre zuständige Stomapflegekraft. Setzen Sie sich, im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in Verbindung mit der Verwendung des Produkts, bitte mit Ihrem lokalen Händler oder dem Hersteller sowie Ihrer zuständigen Behörde vor Ort in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.dansac.com/authority, oder Sie setzen sich mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung.

Die Informationen in dieser Broschüre sind nicht als medizinische Beratung gedacht und sollen die Empfehlungen Ihres eigenen Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte nicht ersetzen. Da sich Bestimmungen ab und zu ändern, besuchen Sie bitte unsere Internetseite für die aktuellsten Informationen.

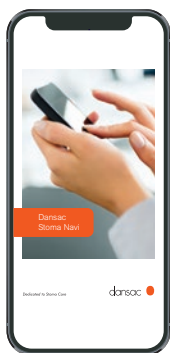

Dansac Stoma Navi – die tägliche Begleitung in der Stomaversorgung

Die App hilft Pflegekräften in der Beratung und liefert wichtige Informationen für die PatientInnen.



Dansac GmbH

Riesstraße 25
80992 München
www.dansac.de

Kontaktdaten für AnwenderInnen und Angehörige

Telefon: 0800/888 33 88 (gebührenfrei)

Mo.–Do.: 8:00 Uhr–17:00 Uhr

Fr.: 8:00 Uhr–14:00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@dansac.com

Wohlfühlen in der eigenen Haut

Weitere Informationen oder Muster zu unseren Beuteln finden Sie bei uns unter www.dansac.de

Die vorliegenden Meinungen beziehen sich auf das abgebildete Testimonial. Diese Meinungen sind repräsentativ für deren Erfahrungen, aber einzigartig und individuell für jede/n AnwenderIn. Dieses Testimonial erhielt von Dansac eine entsprechende Vergütung.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Dansac, das Dansac Logo, NovaLife und TRE sind Markenzeichen der Dansac A/S.
© 2023 Dansac A/S

